

 **amplicomms**

TV3500



INHOUD

Aan de slag	3
Beschrijving van de ontvanger	3
Beschrijving van het zendstation	4
Beschrijving van de afstandsbediening	5
Hoe installeert u de Amplicomms TV3500	5
Het aansluiten van de basis	5
Instellingen van de basis	7
Vervangen van de rubberen oordopjes	7
Plaatsen van de batterij in de afstandsbediening	7
Het registreren van de hoofdtelefoon	7
Gebruik	8
Gebruik van de volumetoetsen	8
Aanpassen van de geluidsniveaubalans	8
Selecteer het audioprofiel (Equalizer)	9
Bevestigingstoon	9
Gebruik van de microfoonknop	9
Probleemoplossing	10
Veiligheidsinformatie	10
Technische gegevens	12
Productgarantie	12
Milieuvriendelijke verwijdering	14
Conformiteit	14

Bedankt voor de aankoop van de Amplicomms TV3500!

Amplicomms TV3500 maakt het mogelijk om draadloos met een hoofdtelefoon naar een tv of hifi-apparaat te luisteren.

Als u hoortoestellen gebruikt, dient u deze te verwijderen voordat u de hoofdtelefoon gebruikt.

BELANGRIJK: ZORG ERVOOR DAT U ALLE VEILIGHEIDSINFORMATIE OP PAGINA 10 HEBT GELEZEN VOORDAT U HET APPARAAT INSTELT.


LAAT KINDEREN DIT APPARAAT NOOIT GEBRUIKEN.

Aan de slag

Inhoud van de doos

- 1 Hoofdtelefoon met rubberen oordopjes maat "S" (klein)
- 1 Extra paar rubberen oordopjes maat "L" (groot)
- 1 Basis
- 1 Infrarood afstandsbediening
- 1 Power-adapter voor de basis
- 1 Optische TOSLINK digitale audiokabel (met plastic bescherming)
- 1 Analoge audiokabel (beide uiteinden met 3,5 mm stereo-stekker)
- Meertalige handleiding
- 2 AAA-batterijen voor de afstandsbediening


Beschrijving van de ontvanger

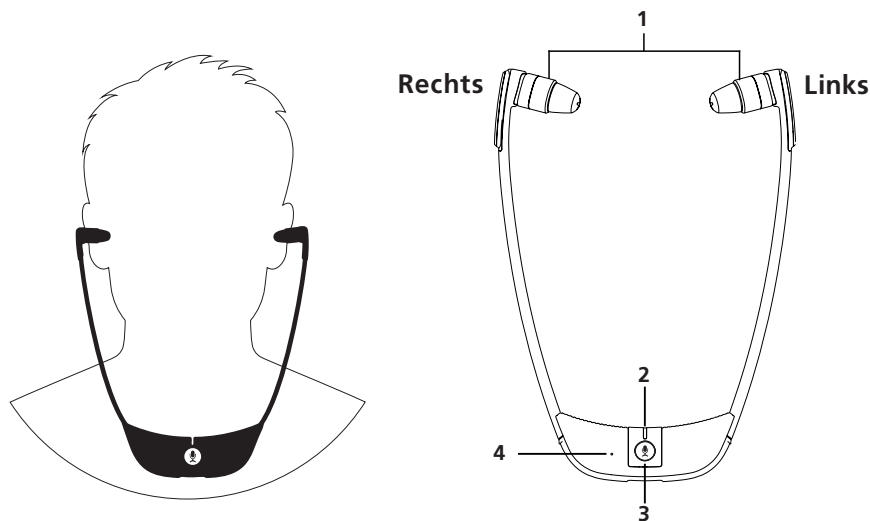

1. Links/rechts-oordopje
2. Led-indicator
3. Microfoon knop voor ruimtebewaking / Power ON/OFF / TV-luistermodus
4. Microfoonopening


Beschrijving van het zendstation

Basis bovenaanzicht

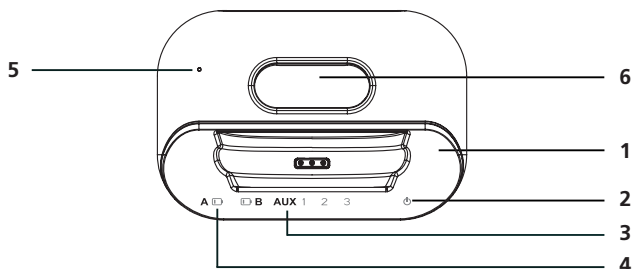


1. Oplaadschaal
2. Led-indicatielampje
3. Input led-indicator (3 = Microfoon, 2 = Analoge ingang, 1 = Optische ingang / TOSLINK)
4. Batterij bijna leeg led-indicator
5. Microfoonopening
6. Afstandsbedieningondersteuning

Basis achteraanzicht

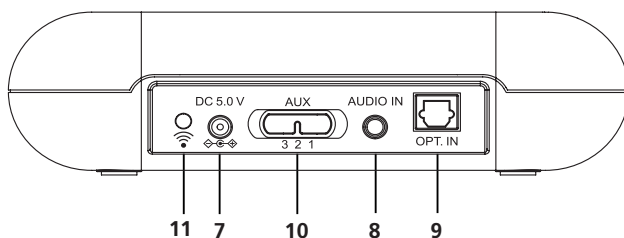

7. Voedingsaansluiting
8. Analoge audio-in bus (3,5 mm)
9. Optische audio-in bus TOSLINK
10. 3 = Microfoon, 2 = Analoge ingang (3,5 mm), 1 = Optische ingang / TOSLINK
- Aux-schakelaar
11. Koppelingsknop

Beschrijving van de afstandsbediening

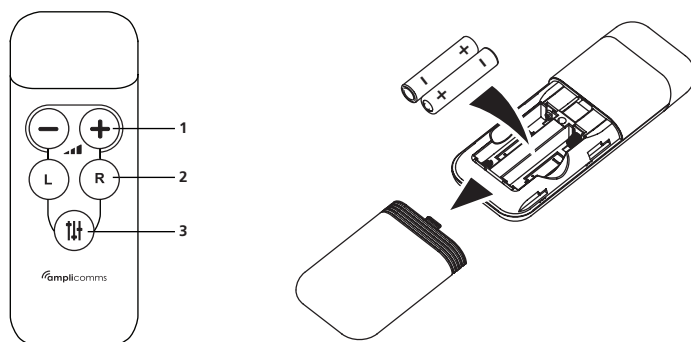


1. Volumeregeling
2. Hoofdtelefoon links/rechts balans
3. Equalizer (Geluidshelderheidsmodus)

Hoe installeert u de Amplicomms TV3500

Het aansluiten van de basis

1. Sluit de netvoedingsadapter aan op de DC-ingang op het achterpaneel van de basis.
2. Steek de stekker van de netvoedingsadapter in het stopcontact.
3. Sluit de basis aan op uw audiobron.


Er zijn 2 manieren om de basis aan te sluiten op de audiobron (tv/hifi): ofwel met een van de twee meegeleverde kabels (analoog of optisch), ofwel met tv/hifi-geluid (als er geen audio-uitgang is op uw tv/hifi-apparaat). De voorkeur gaat uit naar de kabelmodus.

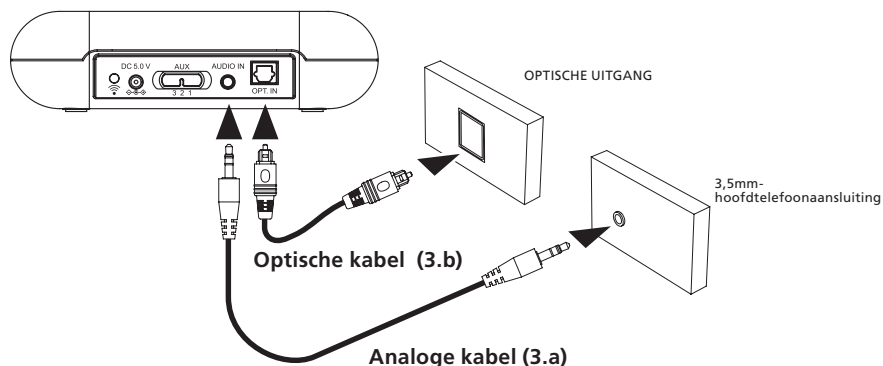

3.a. Met behulp van de analoge audiokabel

Sluit de ene kant van de analoge kabel aan op de basis en de andere kant op de analoge audio-uitgang tv/hifi-aansluiting. Het is mogelijk dat u adapterstekkers dient te kopen als uw tv/hifi-uitgang geen 3,5 mm audio-uitgang heeft (zie onderstaande tekeningen).

Zet vervolgens op de basis de schakelaar (AUX) op stand 2 = analoge ingang.

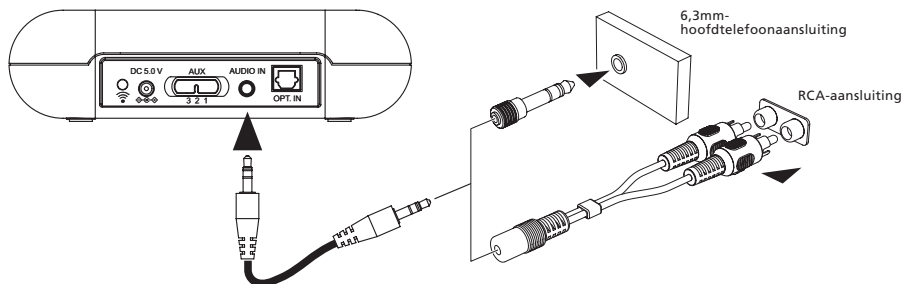

Opmerking: Er zijn geen adapterstekkers inbegrepen

3.b Met behulp van de optische audiokabel

Sluit de ene kant van de optische kabel aan op de basis en de andere kant op de audio-optische uitgang van de tv.

Zet vervolgens op de basis de schakelaar (AUX) op stand 1 = optische ingang.

Deze verbinding biedt een hogere geluidskwaliteit en een lagere gevoeligheid voor elektrische-en magnetische storingen.

Zorg ervoor dat de optische TOSLINK digitale audiokabel niet gebogen of gevouwen wordt! Vermijd het buigen van de kabel.

3.c Gebruik van de basismicrofoon (alleen als er geen audio-uitgang op de tv is)

1. Als uw tv-toestel geen audio-aansluiting heeft, kunt u de microfoon gebruiken om het signaal op te vangen. Zet de basis dicht bij uw tv/hifi-luidspreker voor een betere signaalontvangst. Zet vervolgens op de basis de schakelaar (AUX) op stand 3 = microfoon.
2. Begin met een laag volume op de tv. Verhoog langzaam het volume van de tv totdat het gewenste volume is bereikt. De positie van het basis heeft ook een beslissende invloed op het volume. Bepaal a.u.b. de beste positie door ermee experimenteren.

Instellingen van de basis

Laad de hoofdtelefoonontvanger voor het eerste gebruik ongeveer 2 uur en 30 minuten op. Plaats de hoofdtelefoon in de oplaadschaal van de basis. De led-indicator van de hoofdtelefoonontvanger is rood en wordt paars als de batterij volledig is opgeladen.

- Een volledig opgeladen batterij biedt maximaal 6 uur gebruik van de hoofdtelefoonontvanger.

Advies: Om de hoofdtelefoon altijd volledig opgeladen en operationeel te houden dient u de hoofdtelefoon na elk gebruik op de basis plaatsen.

Vervangen van de rubberen oordopjes

1. Voor de beste gebruikerservaring hebben we twee maten van oordopjes voorzien: Groot en Klein. Als de kleine oordopjes die op de headset zijn bevestigd u niet passen, breng de grote oordopjes aan die zich in de doos bevinden.
2. Om de oordopjes te vervangen, neem het uiteinde van de bevestigde oordopjes vast en trek ze voorzichtig uit. Breng vervolgens de andere set oordopjes op de "open uiteinden" aan en klik ze vast op hun plaats.

Plaatsen van de batterij in de afstandsbediening

1. Plaats batterijen van het formaat AAA in de afstandsbediening en let op de juiste poolrichting + en -.
2. Om de functies te testen, zet u de hoofdtelefoon aan en zet u de tv aan. Richt de afstandsbediening op het basis en druk op de knoppen voor het volume  of ,  of  balansknoppen of de knop  om het geluidsniveau en de kwaliteit aan te passen.

Het registreren van de hoofdtelefoon

De basis en de hoofdtelefoon zijn vooraf gekoppeld. Normaal gesproken is het niet nodig om ze opnieuw te koppelen.

1. Houd de koppelingsknop aan de achterkant van het basis 10 seconden lang ingedrukt. De voedingsled zal continu knipperen.
2. Houd de knop  op de hoofdtelefoon gedurende 10 seconden ingedrukt. De led zal continu knipperen.
3. Wanneer de koppeling succesvol is, zullen de leds van de basis en de hoofdtelefoon constant branden.

Gebruik

Belangrijk: Gehoorschade door hoge volumes!

Deze hoofdtelefoon kan hoge geluidsdrukniveaus produceren. Hoge volumes of lange duur kunnen gehoorschade veroorzaken bij personen met een gezond gehoor en vooral bij kinderen.

- Stel uzelf niet voortdurend bloot aan hoge volumes.
1. Voordat u de hoofdtelefoon gebruikt, stelt u het volume op de afstandsbediening in op een lage waarde.
 2. Schakel de audiobron in (TV/Hifi).
 3. Als de hoofdtelefoonontvanger UIT is, zal de led uit zijn. Druk kort op de knop  op de hoofdtelefoon om hem in te schakelen.
 4. Buig de armen van de hoofdtelefoonontvanger naar buiten tot de oordopjes in de oren kunnen worden gestoken. Let op: de oordopjes kunnen door een beweging omhoog, omlaag of opzij worden gekanteld om iets dieper in het oor te komen. Dit zal de geluidskwaliteit en het volume verbeteren. Druk de oordopjes voorzichtig verder in het oor om een comfortabele positie voor de oordopjes te vinden en een ideale positie voor de geluidswaergave.
 5. Pas de geluidsterkte aan met de knoppen  of  op de afstandsbediening.

Opmerking: Als de batterij van de hoofdtelefoon bijna leeg is, hoort u elke minuut 2 piepjes in de hoofdtelefoonontvanger.

Gebruik van de volumetoetsen

Als u de afstandsbediening op het zendstation richt, drukt u op de knop  of  om een comfortabel volume te bereiken.

Aanpassen van de geluidsniveaubalans

Als u de afstandsbediening op het zendstation richt, drukt u op de knop  of  om de balans tussen links en rechts aan te passen.

Selecteer het audioprofiel (Equalizer)

Richt de afstandsbediening op de basis, druk op de knop  om een van de 4 beschikbare audioprofielen te selecteren.

Instelling	Effect
1	Vlak
2	Meer bas
3	Meer hoge tonen
4	Duidelijkheid

Opmerking: Om terug te gaan naar de standaard fabrieksinstellingen, drukt u kort op de koppelingsknop aan de achterkant van de zender.

Bevestigingstoon

U hoort een pieptoon als bevestiging voor elke druk op een toets van de TV3500 afstandsbediening. Enkele speciale pieptonen kunnen in de volgende gevallen worden gehoord:

1. U hoort 2 pieptonen wanneer het volumeniveau het maximum of minimum bereikt.
2. U hoort 2 pieptonen wanneer het verschil tussen het linker en rechter geluidsniveau het maximum bereikt.
3. U hoort een lange pieptoon wanneer het linker en rechter geluidsniveau gelijk zijn.
4. U hoort 2 pieptonen wanneer EQ1 (Flat) is geselecteerd.

Gebruik van de microfoonknop

In de actieve modus, druk op de knop  om over te schakelen van tv-luisterstand naar de transparantiemodus. De hoofdtelefoon-indicator gaat van blauw naar rood. De microfoonopening bevindt zich aan de voorkant van de hoofdtelefoon om de geluiden van uw omgeving op te vangen. Zorg ervoor dat de opening van de microfoon niet wordt afgedekt.

Als de microfoon is ingeschakeld, hoort u ook de omgevingsgeluiden. U kunt bijvoorbeeld uw deurbel of uw gesprekspartner horen, zelfs als u de hoofdtelefoon draagt.

Om terug te gaan naar de tv-luisterstand, drukt u opnieuw op de knop . De indicator van de hoofdtelefoonontvanger wordt blauw en u hoort het geluid van de audiobron weer.

Energiebesparende modus:

Om stroom te besparen gaat de hoofdtelefoonontvanger in de slaapstand als er gedurende ongeveer 5 minuten geen signaal wordt gedetecteerd. Om de hoofdtelefoonontvanger wakker te maken, drukt u op de knop .

Opmerking: Om de headset uit te schakelen, druk en houd de knop  3 seconden ingedrukt. De led op de headset gaat uit.

Probleemoplossing

Geen geluid

- Zorg ervoor dat de netvoedingsadapter in het stopcontact is gestoken en dat de kabel goed is aangesloten op de DC IN-connector van de basis.
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoonontvanger is ingeschakeld. De rode of blauwe led brandt constant.
- Het laadniveau van de batterij in de hoofdtelefoon kan te laag zijn. Plaats de hoofdtelefoonontvanger 2 uur lang op het laadstation.
- Zorg ervoor dat het tv-toestel, het hifi-systeem of de audiocomponent is ingeschakeld en dat de ingangsbronkeuze/aansluiting correct is (AUX-schakelaar).
- De aangesloten audio-/videoapparatuur staat mogelijk niet in de afspeelmodus. Start de weergave op het apparaat.
- Het uitgangsniveau van de hoofdtelefoonontvanger is te laag ingesteld. Stel het volume in op een geschikt niveau met de afstandsbediening.

Vervorming

- De hoofdtelefoonontvanger kan te ver van de zender verwijderd zijn. Plaats de zender en de ontvanger dicht bij elkaar.
- Het ingangsniveau van het audiosignaal is te laag/hoog. Verhoog/verlaag het volume van de audiobron tv/hifi.

Veiligheidsinformatie

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is ontwikkeld om audiosignalen van een audiobron zoals een tv of hifi-apparaat naar een hoofdtelefoon te sturen, met behulp van draadloze transmissie. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbedoeld gebruik. Ongeoorloofde wijziging of verandering is niet toegestaan. In geen geval mogen de apparaten worden geopend of mag u zelf reparaties uitvoeren.

Installatieplaats en veiligheidsinformatie

- Voorkom overmatige blootstelling aan rook, stof, trillingen, chemicaliën, vocht, hitte en direct zonlicht.

- De rubberen voetjes van de basis kan gevoelige oppervlakken van meubels aantasten. Om mogelijke vlekken te voorkomen, kunt u de basis op een onderzetter plaatsen.
- Dit apparaat stelt u in staat om geluiden te versterken tot een hoog volume. Het luisteren via een hoofdtelefoon op een hoog volume over een langere periode kan het gehoor beschadigen, vooral bij kinderen. Wij raden u dan ook aan het volume op een voor uw gehoor comfortabel niveau in te stellen.

Voor gebruikers die een pacemaker dragen

Het wordt aanbevolen dat u contact opneemt met uw arts voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als u merkt of vermoedt dat er sprake is van schadelijke effecten.

Netvoedingsadapter

Let op: Gebruik alleen de meegeleverde netvoedingsadapter anders kan de basis beschadigd raken. Zorg ervoor dat de toegang tot de stekker van de netvoedingsadapter niet wordt belemmerd door meubels of andere objecten.

Let erop dat de stekker en de kabel in perfecte staat zijn. Een geknikte of versleten kabel is gevaarlijk! De meegeleverde netvoedingsadapter voldoet aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van ecologisch ontwerp (Richtlijn 2005/32/EG). Dit betekent dat het stroomverbruik, zowel in bedrijfstoestand als in rusttoestand, aanzienlijk lager is dan bij oudere netvoedingsadapters.

Onderhoud

- Reinig de behuizingsoppervlakken met een zachte, pluisvrije doek.
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

Technische gegevens

Draaggolffrequentie: 1,8 GHz digitaal

Bereik: Tot 30 meter (open ruimte)

Frequentierespons: 30 Hz - 20 KHz

Geluidsdruk niveau: max. 125 dB SPL bij gemiddeld 1 kHz

Vervorming: < 1,5%

Signaal-ruisverhouding: > 70 dB

Bedrijfsspanning (Basis): 5VDC, 550mA

Bedrijfsspanning (Hoofdtelefoon): 3,7 V, 450 mA lithium-polymeer-batterij

Gebruikstijd: Met volledig opgeladen batterij tot 6 uur

Opladtid: Bij lege batterij ca. 2,5 uur

Gewicht Hoofdtelefoon: 61 g

Gewicht Basis: 150 g

Productgarantie

Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt, ook wanneer u met dit type product al bekend bent.

Het product TV3500 is apparatuur, dat in overeenstemming met de Europese regelgeving is goedgekeurd. Dit wordt bevestigd door het CE-merk.

Het product dat u zojuist heeft gekocht, is een technologisch product, dat met zorg dient te worden gehanteerd.

Opmerking: u beschikt over een wettelijke garantie voor dit product in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de verkoop van consumptiegoederen in het land waarin u dit heeft aangeschaft.

Voor alle informatie in verband met deze wettelijke garantie, wendt u zich tot uw detailhandelaar.

Onverminderd de wettelijke garantie die op deze producten van toepassing is, garandeert ATLINSK Europe, met zetel in 147 avenue Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison, Frankrijk, dat het product dat in de aanwezige verpakking zit, conform is aan de technische specificaties vermeld in de gebruikshandleiding die in de huidige verpakking is bijgevoegd. Deze garantie geldt gedurende een garantieperiode, gerekend vanaf de aanschafdatum van het nieuwe product, dat is de datum die vermeld is op uw factuur of uw kassabon waarop de naam van uw detailhandelaar is aangegeven en die het bewijs hiervan vormt, en is gelijk aan: vierentwintig(24) maanden voor het hoofdtelefoon, met uitsluiting van de verbruiksartikelen, accessoires en batterijen.

Voor elke klacht krachtens deze garantie tijdens de garantieperiode, dient u het complete product, nadat het defect is verschenen of ontdekt, te retourneren aan uw detailhandelaar, begeleid van het aankoopbewijs, dat bestaat uit de factuur of deze kassabon verstrekt door uw detailhandelaar, waarop de plaats van de aankoop en het serienummer van het product zijn aangegeven. ATLINSK verbindt zich ertoe elke gebrekkige component op zijn kosten te herstellen, als dit gebrek veroorzaakt is door een fout in het ontwerp, het

materiaal of de productie, of deze op zijn kosten te vervangen door een identieke of ten minste gelijkwaardige component in termen van functionaliteit en prestaties.

Als de reparatie of de vervanging onmogelijk blijkt onder normale commerciële condities, zal het product aan u worden vergoed of worden vervangen door een gelijkwaardig product.

Tot de door het toepasselijke recht maximaal toegestane beperking, is het vervangende product of de vervangende component, die nieuw of hersteld kan zijn, gegarandeerd gedurende een periode van negentig (90) dagen, gerekend vanaf de datum van reparatie of tot de einddatum van de oorspronkelijke garantieperiode indien deze laatste meer is dan negentig (90) dagen, waarbij wordt aangetekend dat elke immobilisatieperiode van het product van ten minste zeven (7) dagen bij de duur van de nog lopende garantie wordt opgeteld.

Deze garantie is in onderstaande gevallen niet van toepassing:

Installatie of gebruik niet overeenkomstig de instructies zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing,

Een slechte aansluiting of abnormaal gebruik van het product, met name met niet geschikte accessoires, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing, Geopend of gewijzigd product of vervangingen door niet goedgekeurde onderdelen, Gewist, onleesbaar, beschadigd serienummer, Normale slijtage, met inbegrip van de normale slijtage van de accessoires, batterijen en displays, Niet-naleving van de technische en veiligheidsnormen die van kracht zijn in de geografische gebruikszone,

Product dat werd onderworpen aan een schok of is gevallen,

Product dat beschadigd is door bliksem, een elektrische overspanning, een warmtebron of stralingsbron, schade door water of blootstelling aan temperatuur-, vochtigheids- of andere excessieve omgevingscondities of elke andere uitwendige oorzaak op het product,

Nalatigheid of slecht onderhoud,

Een ingreep, een wijziging of een reparatie uitgevoerd door een persoon die niet werd erkend door Atlinks.

Als het geretourneerde product niet gedekt wordt door de garantie, ontvangt u een prijsopgave voor de reparatie die de kosten van de analyse en de kosten van het transport vermeldt, die aan u zullen worden berekend indien u wenst dat het product aan u wordt geretourneerd.

Deze garantie is geldig in het land waarin u het product op wettige wijze heeft gekocht, op voorwaarde dat dit land lid is van de Europese Unie.

Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, zijn alle garanties anders dan die beschreven in dit document, uitdrukkelijk uitgesloten.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET,

A) IS DE HUIDIGE GARANTIE, EXCLUSIEF ALLE OVERIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP HANDELSKWALITEIT OF TOEPASSING VOOR EEN SPECIAAL DOEL;
B) WIJST ATLINKS ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, VERLIES VAN HET GEBRUIK, GEMISTE WINSTEN, VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN, VAN OMZET OF VAN INKOMEN, EXPLOITATIEVERLIEZEN, INDIRECTE, IMMATERIËLE, GEVOLG- OF BIJKOMENDE SCHADES;
C) IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ATLINKS BEPERKT TOT DE AANSCHAFWAARDE VAN HET PRODUCT, BEHALVE BIJ ZWARE OF OPZETTELIJKE FOUTEN, EN BEHALVE BIJ LICHAMELIJK LETSEL.

Milieuvriendelijke verwijdering



Volgens de Europese regelgeving 2002/96/EC met betrekking tot elektrisch - en elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo minder milieubelastend zijn. Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselijke regelgeving contact op met uw gemeente.

Conformiteit



Het logo gedrukt op het product geeft de conformiteit aan met alle essentiële vereisten en alle toepasselijke richtlijnen 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring downloaden van onze website www.amplicomms.com

Maximale uitgangsvermogen (NTP) : 24dBm
Frequentiebereik : 1880-1900MHz

www.amplicomms.com

ATLINKS Europe
28 Boulevard Belle Rive
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

Atlinks UK Ltd, 3rd Floor, Waverley House
7-12 Noel Street, London, W1F 8GQ. UK
Company registration: 13809295

© ATLINKS 2022 - Reproductie verboden.

De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties van zijn producten te wijzigen om technische verbeteringen aan te brengen of om te voldoen aan nieuwe voorschriften.

AMPLICOMMS en ATLINKS zijn geregistreerde handelsmerken.