


PerfectDome


Droogstelsysteem en UV-C
voor laders en hoorapparaten

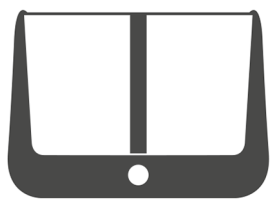

Voor alle soorten laders van hoorapparaten






x1

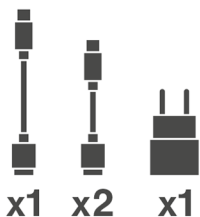


x1

x2

x1

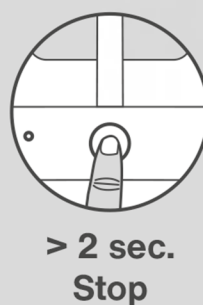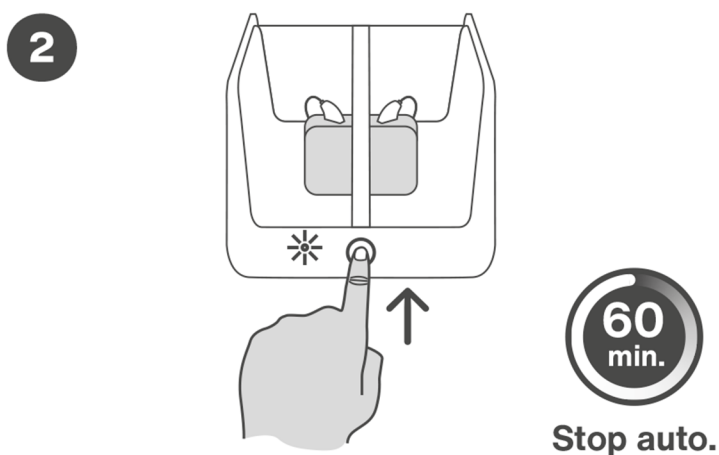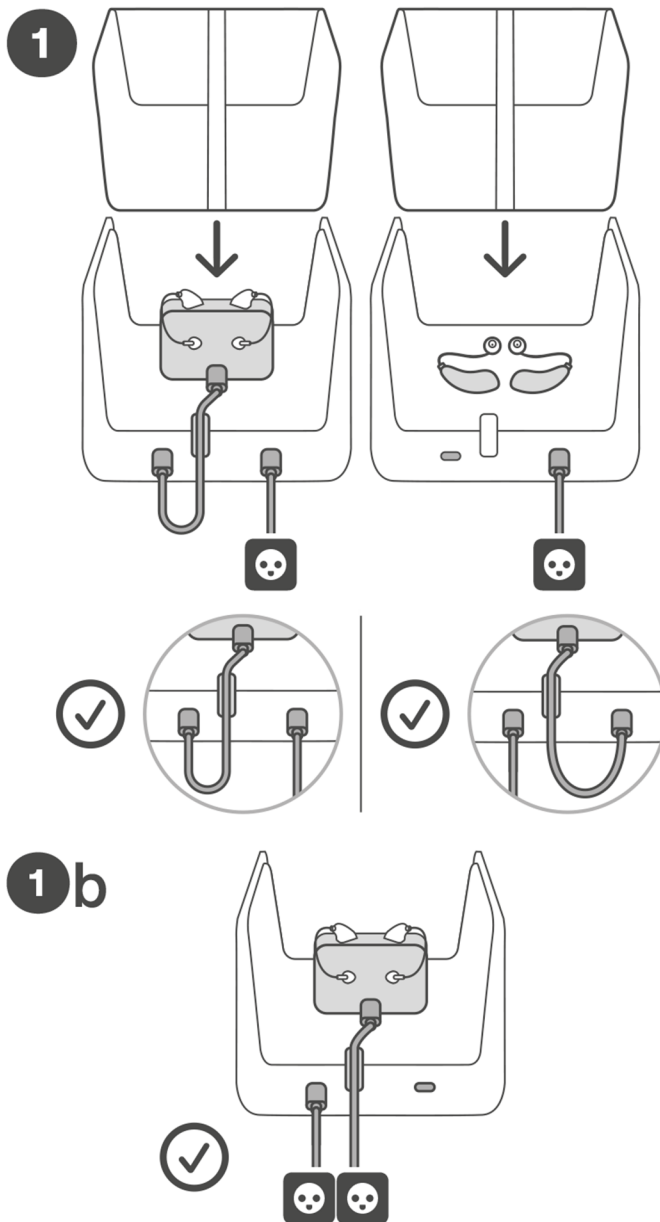

> 2 sec.
Stop

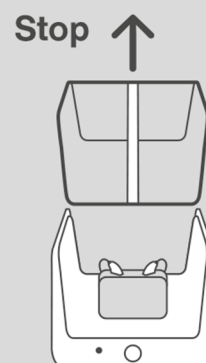

NL

- 1

Sluit de PerfectDome aan. Het witte lampje knippert 3 keer om aan te geven dat hij aanstaat. Sluit de lader van uw hoorapparaat aan op de PerfectDome. Als de lader niet werkt, sluit deze dan rechtstreeks aan op de originele voeding (Fig. 1b). PerfectDome is geschikt voor alle soorten hoorapparaten en hun laders.
- 2

Om de cyclus te starten raakt u de aanraakknop aan (deksel gesloten). Het blauwe lampje knippert langzaam. PerfectDome stopt automatisch na 60 minuten of nadat de aanraakknop 2 seconden wordt ingedrukt. Het blauwe lampje gaat uit.
Zorg er ook voor dat u het klepje niet opent tijdens de werking, want dan wordt PerfectDome uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen om de hoorapparaten te reinigen vóór de ontvochtiging.

Details van de werking

UV-C
PerfectDome is uitgerust met UV-C LED's die zo zijn geplaatst dat ze alle te behandelen oppervlakken bereiken. De UV-C LED's werken gedurende de hele onderhoudscyclus.

Ontvochtiging
PerfectDome heeft een gepatenteerd pulserend ontvochtigingssysteem met warme lucht. De onderhoudstemperatuur wordt geregeld door een elektronisch systeem dat zich aanpast aan de omstandigheden waarin de hoorapparaten worden gebruikt.

Om de optimale kwaliteit van uw hoorapparaten te behouden, wordt dagelijks gebruik van PerfectDome sterk aangeraden.

Beoogd gebruik:
PerfectDome is een medisch hulpmiddel van klasse I, bedoeld voor het onderhoud van hoorapparaten alleen of in hun respectievelijke laders.
PerfectDome is ontworpen om:
Hoorapparaten te drogen om defecten door vocht te voorkomen.
Het oppervlak van hoorapparaten te behandelen om eventueel aanwezige micro-organismen te elimineren, waardoor pathologieën van de gehoorgang die geassocieerd worden met het dragen van hoorapparaten worden beperkt.

Beoogde gebruikers/gebruikersgroepen:
Slechthorenden die hoorapparaten gebruiken en hun verzorgers.

Audicien verantwoordelijk voor de gebruiker. Volwassenen en kinderen ouder dan 16 jaar.

Veiligheidsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen en mensen met cognitieve beperkingen houden. Dompel PerfectDome en accessoires niet onder in water of een andere vloeistof. Vervang de netadapter door een origineel model. Plaats de PerfectDome op een vlakke, droge en stabiele ondergrond. Bij het niet naleven van deze maatregelen, vervalt de garantie. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist gebruik of verkeerde handeling.

Neem contact op met een audicien in geval van problemen. Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Storing
Het rode lampje gaat branden. Koppel de PerfectDome los en sluit hem opnieuw aan. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw audicien.

Onderhoudstips
Reinig met een zachte doek. Spuit geen vloeistof in het apparaat. Houd de PerfectDome gesloten wanneer het niet wordt gebruikt, zo voorkomt u vuilafzetting.

Voorschriften voor medische hulpmiddelen
Dit product voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2017/745 die van toepassing is op medische hulpmiddelen.

Garantie
24 maanden - (kabels en transformator inbegrepen). Contacteer onze audicien indien uw toestel defect is. Voor een dienst na verkoop tijdens de garantieperiode dient u in het bezit te zijn van het aankoopbewijs. Deze garantie geldt niet voor een storing veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, nalatigheid, abnormaal gebruik, demontage, gebrek aan onderhoud of andere omstandigheden te wijten aan de gebruiker. Bovendien is deze garantie niet van toepassing in het geval van een storing veroorzaakt door blikseminslag of een andere variatie in de elektrische spanning. Uit voorzorg raden wij aan dat u de PerfectDome loskoppelt bij onweer.

Identificatiemarkeringen

Betekenis van afkortingen:

 Dit product voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 die van toepassing is op Medische Hulpmiddelen.	
 Naleving beoordeeld in het Verenigd Koninkrijk	
 Fabrikant	 Productiedatum
 Uniek identificatienummer van het hulpmiddel	 Medisch hulpmiddel
 Serienummer	 Lees zorgvuldig de handleiding
 Catalogusnummer	5V-2A  Gelijkstroom
 Partijnummer	 Gebruik binnenshuis
 Het product is gemaakt van ABS met recyclingcode 7	 Sorteerinstructies
 AFVOER - Gooi oude apparaten op een milieuvriendelijke manier weg. Oude apparaten bevatten recyclebare materialen die gerecycled moeten worden. Gelieve oude apparaten in te leveren via de daarvoor bestemde inzamelingspunten.	

Technische gegevens

Functionaliteiten	
Externe afmetingen (bxhxd): 157 x 122 x 140 mm	Droogtijd: 35 °C (95 °F) max.
Gewicht (g): 419 g	Cyclusduur: 60 min.
LED UVC : 275 nm	Omgevingstemperatuur voor werking: van 10 °C tot 35 °C
Max. vermogen: 9 W	Stroomtoevoer:
Vermogen in stand-by: 0,09 W	Ingang: 100-240 Vac 50-60 Hz / Uitgang: 5 Vdc
Opslagvoorwaarden van -20 °C tot +65 °C	Aansluitingen: USB-A - USB-C kabel

 Ik zorg voor het milieu, dus koppel ik het netsnoer van mijn PerfectDome-apparaat los als mijn hoorapparaten gereinigd zijn.